

## 販売名：ぷにゅ蔵くん

## 【禁忌・禁止】

以下の症状を示す人、又は診断を受けた人への使用はやめること。

- ① 知覚鈍麻のある部位
- ② その他医師が不適当と判断した人。

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 形状、構造

本品は図-1の構造、図-2の形状を有するものである。

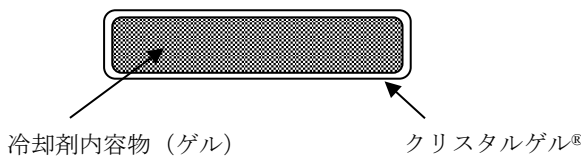


図-1 (断面図)



図-2

## 2. 原理

冷却媒体の入った本品を冷却装置で冷却・蓄冷し、その冷却効果により接種部位を冷却する。

## 【使用目的又は効果】

冷却された本品を接種部位にあて、消炎鎮痛処置(冷感治療)を行うパックである。本品は再使用可能である。

## 【使用方法等】

1. 冷凍庫(一般家庭用冷凍庫(フリーザー等))を設置する。
2. 「ぷにゅ蔵くん」を付属のアルミ袋に入れ、冷凍庫に入れ冷却する。
3. 冷却された「ぷにゅ蔵くん」を冷凍庫から取り出し、破損などが無いかを確認する。
4. 「ぷにゅ蔵くん」を接種部位に30~60秒あて接種部位を冷却し終了する。使用する場合は医師の管理のもと、凍傷に十分注意し使用すること。
5. 使用後は水分を拭き、汚れ・破損などの確認を行った後、付属のアルミ袋に入れ冷凍庫で再度冷却する。また、続けて使用しない場合も付属のアルミ袋には入れること。

## 【使用上の注意】

1. 冷却直後の「ぷにゅ蔵くん」を使用する場合は医師の管理のもと、凍傷に十分注意し使用すること。
2. 処置に必要な冷却時間を超えないように注意すること。
3. 患者に異常が見られた場合、直ちに使用を中止し適切な処置をとること。
4. 「ぷにゅ蔵くん」に破損などの異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し新しいものと取り換えること。
5. 加熱は絶対にしないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 使用後は水分を拭き取り清拭して、付属のアルミ袋に入れ、保管すること。保管方法を誤ると、早期にジェルの痩せや気泡混入が発生し、本来の性能や使用感が得られなくなります。
2. 「ぷにゅ蔵くん」は、一部消耗品の要素があるので、破損状況を見極め定期的に交換すること。
3. 保管は高温、極寒、多湿の場所や直射日光を避け、先入れ先出しを守ること。(保管・管理に怠りがある場合、劣化の原因になることがある)
4. 使用期間は原則的に3ヶ月間が望ましいが、破損や傷が無い場合は使用できる。
5. 冷凍庫に入れ続ける事で表面にヌメリが出る事がありますが、人体への害はありません。中性洗剤で洗い、ご使用ください。

## 【取扱い上の注意】

1. 「ぷにゅ蔵くん」はクリスタルゲル®に包まれたゲル剤で構成されているので、乱暴に扱ったり、鋭利なものが触れると破損の原因になりますのでご注意ください。また、非常に良く伸び、変形しますが、必要以上に引っばったり、強く押さえつける、握る、局部的に圧を掛けるなどの負荷をかけると破れます。
2. 冷却専用ですので温めてのご使用はお止めください。破損の原因になります。
3. 業務用冷凍庫など、-20℃以下で冷却はお止めください。
4. トルエン、キシレンなどの溶剤で拭かないでください。破損の原因になります。

## 【保守・点検に係る事項】

1. 「ぷにゅ蔵くん」は一部消耗品の要素があるので、施術前に破損がないことを定期的に点検し、内容物の液漏れが無いか、クリスタルゲル®に破損は無いかを点検し不慮の障害を未然に防ぐこと。

## 【製造販売業者】

名称 株式会社タナック  
住所 岐阜県岐阜市元町4丁目24番地  
連絡窓口 お客様相談室  
電話番号 0120-638-122

裏面の取扱説明書を必ずご参照下さい。