


子供の注射の痛みを和らげる **超柔軟冷却ジェルパッド**

ぷにゅ蔵くん



しっかり冷やして
注射の痛みを軽減!

穿刺痛低減アイスパック

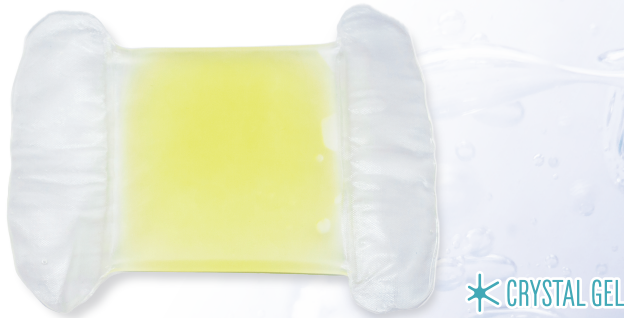

伸縮性にも優れた素材「クリスタルジェル®」を使用

肌に当たる部分には、タナック独自配合の超柔軟ジェル素材 (クリスタルジェル®) を使用しているので伸びた後も歪むことなく元の形に戻ります。医療の現場でも使用されている安全性の高い素材です。



クリスタルジェル® と保冷ジェルの組み合わせた超柔軟冷却ジェルパッドだから肌当たりも抜群。局部を包み込むように冷却します。

性能評価

医療機関にて臨床研究を実施し、子どもの疼痛(とうつう)評価指標である FLACC スケールにて統計的に有意差があることが確認されました。



使用方法


- ① 冷凍庫内で3～4時間ほど冷却して下さい。
- ② 冷却された「ぷにゅ蔵くん」を取り出し、接種部位に30～60秒あてがってください。
- ③ 「ぷにゅ蔵くん」を肌から外したのち、60秒以内に皮下注射を行ってください。




※医師の管理のもと、凍傷に十分注意してご使用下さい。

ぷにゅ蔵くん 30秒使用後の肌表面温度の変化

肌表面温度は約13～14℃急速低下。
柔軟ジェルだから患部を面で優しく冷却します。

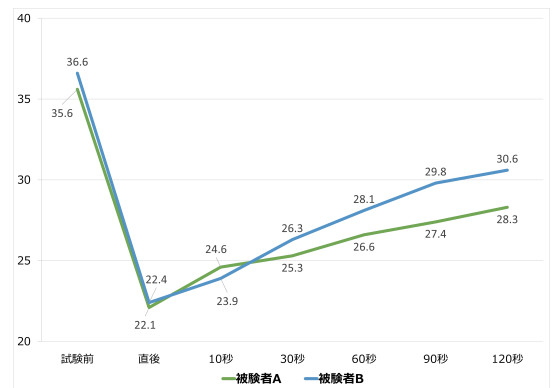

冷却前 → 冷却直後 → 30秒 → 60秒

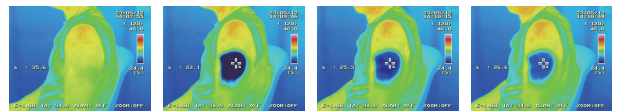

*試験条件: 家庭用冷凍庫 (-18℃設定) にて冷却した製品を約26℃環境下にて試験実施。

類別	器 12 理学診療用器具	一般医療機器 一般名称	冷却パック (コード: 37240020)	届出番号	21B3X10017000001
販売名	ぷにゅ蔵くん 穿刺痛低減アイスパック	JAN	4589720791031	定価	3,200円(税別)
		サイズ	約15.5×13cm	ケース入数	6個

TenderSense

製造販売元: 株式会社タナック
〒500-8185 岐阜県岐阜市元町4-24

TEL: 058-263-6381
FAX: 058-263-6382

タナック公式サイト
<https://tendersense.jp/>