

取扱説明書

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。

ぷにゅ蔵くん

【特徴】

- 冷凍庫で冷却するだけで使用できます。
- 冷却しても柔軟性を保つゲルで患部に柔軟にフィットします。
- ゲルを包む袋に「クリスタルゲル®」を使用しているため、従来のフィルムタイプの様にパックの端が痛くなく、体に優しくフィットします。
- 冷却性に優れた内容物を使用しています。

【使用方法】

- 冷凍庫の電源を入れてください。
冷凍庫が冷えたら「ぷにゅ蔵くん」を付属のアルミ袋に入れ、冷凍庫内で3~4時間ほど冷却してください。
- 冷凍庫の能力や「ぷにゅ蔵くん」の数量によって冷却時間は変化しますので、冷たさを確認しながら冷却してください。
- 冷却された「ぷにゅ蔵くん」を接種部位に30~60秒あてがってください。
- 「ぷにゅ蔵くん」を肌から外したのち、60秒以内に皮下注射を行ってください。

※医師の管理のもと、凍傷に十分注意してご使用ください。

【保管方法】

- 使用後は汚れ・破損などの確認を行った後、付属のアルミ袋に入れ冷凍庫で再度冷却してください。
- 続けてご使用にならない場合、汚れ、破損などの確認後、付属のアルミ袋に入れて保管してください。

【使用例】



【耐久性】

本品の耐久性はご使用条件にもよりますが、安全にご使用いただくには約3か月を目安としてください。
長期間のご使用で冷却性能や使用感が損なわれますので、新しい製品へのお取り換えをお勧めいたします。



【使用上の注意】

1. 安全にご使用いただくために以下にご注意ください

- 凍傷を防ぐために以下の様な使用はしないでください。
 - ・本品の破損や、内容物が漏れ出している時。
(ご使用前には破損などのないことを十分にご確認ください)
 - ・長時間のご使用は凍傷になる場合がありますのでご注意ください。
- 肌の弱い方、本品をすぐに取り外せない方へのご使用は十分にご注意ください。
- 本品の使用により異常が認められたときには、医師にご相談ください。
- 次の様な症状のある方は症状の進行や凍傷の恐れがありますので、ご使用にならないでください。
(温感・痛覚障害、虚血部位(動脈閉塞))

2. 本品の破損、劣化を防ぐため、以下の行為をおやめください。

- 液体窒素やドライアイスでの冷却。
- 加熱しての使用。
- 落下、突刺し、衝撃などを加える。
- 背中、腰などの下に敷いて荷重をかける。
- 薬剤、油類への接触。
- トルエン、キシレンなどの溶剤で拭き取る行為。
- 業務用冷凍庫など、-20℃以下での冷却。
- 「ぷにゅ蔵くん」は非常に良く伸び・変形しますが、必要以上に引っ張る・強く押さえつける・握る・局部的に圧を掛けるなどの行為。

3. その他

- 冷凍庫に入れ続ける事で表面にヌメリが出る事がありますが、人体への害はありません。中性洗剤で洗いご使用ください。
- 汚れなどは水や中性洗剤などで洗い、清潔に管理してご使用ください。
- 消毒する場合は消毒用エタノールで表面の拭き取りを実施し、それ以外の薬剤の使用および滅菌はしないでください
- 本品を廃棄する場合は、各市町村のごみ処理規定に準じてください。(一般的には可燃物として廃棄処理してください)

株式会社タナック

〒500-8185 岐阜県岐阜市元町4丁目24番地 TEL 058-263-6381 / FAX 058-263-6382
ホームページ URL <https://www.k-tanac.co.jp>



会社 HP